

Nexcare™

Kit de premiers soins

FR

Le kit de premiers soins Nexcare™ est un set de produits pour les premiers soins de petites plaies cutanées. Les produits sélectionnés sont contenus dans un sachet léger et refermable qui peut être emporté partout.

Ce mode d'emploi contient une courte description de chaque produit et des recommandations d'utilisation.

Précaution :

Consultez un médecin ou un autre professionnel de santé qualifié si vous avez le moindre doute sur la façon de soigner correctement une plaie ou toute autre lésion. Le kit comprend des produits à usage unique : lorsqu'on réutilise ces produits, ils ne reprennent plus aux critères et ne peuvent plus remplir leur rôle.

Contenu du set :

- 4 pansements Nexcare™ Comfort (25 mm x 72 mm)
- 5 pansements Nexcare™ Active (19 mm x 72 mm)
- 2 pansements Nexcare™ Aqua 360° Maxi (60 mm x 89 mm)
- 2 pansements Nexcare™ Active 360° Maxi (50 mm x 101 mm)
- 1 sachet de sutures cutanées adhésives Steri-Strip™ (6 x 6 mm x 38 mm)
- 1 sachet de sutures cutanées adhésives Steri-Strip™ (3 x 6 mm x 75 mm)
- 4 lingettes nettoyantes
- 1 paire de gants

Nexcare™ Comfort

Pansements - spécial douceur - pour toute la famille.

4 pansements 25 mm x 72 mm

Dotés d'un support doux et multi-extensible, ces pansements laissent respirer la peau. Leur adhésif est hypoallergénique, il offre une excellente adhérence et les pansements sont faciles à retirer.

Mode d'emploi :

1. Nettoyez minutieusement la plaie et son pourtour. Laissez sécher.
2. Appliquez le pansement sans tension et lissez les bords pour bien le faire adhérer.

Nexcare™ Active

5 pansements 19 mm x 72 mm

Dotés d'un support mousse, les pansements Active sont très flexibles et adhèrent parfaitement à la peau même humide ou en sueur, sans coller à la plaie. Au besoin, ils sont très faciles à enlever.

Mode d'emploi :

1. Nettoyez minutieusement la plaie et son pourtour. Laissez sécher.
2. Appliquez le pansement sans tension et lissez les bords pour bien le faire adhérer.

Nexcare™ Aqua 360° Maxi

2 pansements 60 mm x 89 mm

Pansements - spécial coude et genoux - 100% étanches à l'eau et aux bactéries. Ces pansements protègent la plaie de l'eau, de la saleté et des bactéries. Dotés d'un support fin semi-perméable qui laisse respirer la peau et d'un adhésif hypoallergénique, ils peuvent rester en place pendant plusieurs jours même pendant le sport, sous la douche ou à la piscine. Utilisez-les pour panser les petites coupures, égratignures et autres plaies superficielles.

⚠ L'emballage individuel du pansement contient du latex qui peut être à l'origine de réactions allergiques.

Mode d'emploi :

1. Nettoyez minutieusement la plaie et son pourtour. Laissez sécher.
2. Ouvrez le sachet par le côté.
3. Décollez le pansement du support à l'aide de la languette.
4. Appliquez en le centrant sur la plaie. Pressez fermement.
5. Retirez le cadre de pose en papier à l'aide des languettes rondes centrales et lissez bien les bords.
6. Pour enlever le pansement, décollez un bord et procédez à l'étirement du pansement parallèlement à la peau.

Nexcare™ Active 360° Maxi

2 pansements 50 mm x 101 mm

Les pansements Active "spécial coude et genoux" sont très flexibles et adhèrent parfaitement à la peau même humide ou en sueur, sans coller à la plaie. Au besoin, ils sont très faciles à enlever.

Support adhésif qui entoure la compresse non adhérente pour mieux protéger la plaie.

Mode d'emploi :

1. Nettoyez minutieusement la plaie et son pourtour. Laissez sécher.
2. Appliquez le pansement sans tension et lissez les bords pour bien le faire adhérer.

Sutures cutanées adhésives stériles 3M™ Steri-Strip™

1 sachet de 3 sutures 6 mm x 75 mm

1 sachet de 6 sutures 6 mm x 38 mm

Mode d'emploi :

1. Assurez-vous que la plaie ne saigne plus, puis nettoyez minutieusement et laissez sécher la peau sur au moins 5 cm autour de la plaie.
2. Ouvrez la pochette, sortez le support cartonné avec les bandelettes adhésives et détachez une des extrémités du support en suivant la ligne prédécoupée.
3. Rapprochez et maintenez alignées d'une façon parfaite les berges de la plaie.
4. Posez perpendiculairement le motif d'une première bandelette sur une berge au centre de la plaie. Pressez fermement. Puis posez sans tension la deuxième partie de la bandelette sur l'autre berge et massez encore.
5. Posez les sutures suivantes en laissant au moins 3 mm entre chaque bandelette afin de faciliter le drainage éventuel d'exsudats.
6. Protégez si besoin la plaie par un pansement Nexcare Aqua Maxi inclus dans la trousse de secours.

Lingettes nettoyantes

4 lingettes nettoyantes

Pour le nettoyage de petites plaies cutanées

Fabriqué par :

AKLA AB
Box 534, 182 15 Danderyd, Suède

Gants

1 paire de gants en latex

⚠ Ce produit contient du latex qui peut provoquer des réactions de type allergique chez certains individus.

Fabrique par: TG Medical Sdn
Sdn. Bhd. 41050 Klang, Selangor D.E. Malaisie

Nexcare™

Erste-Hilfe-Set

DE

Das Nexcare™ Erste-Hilfe-Set enthält eine Auswahl von Wundversorgungsprodukten zur Behandlung der meisten kleineren Wunden und Hautverletzungen. In einem praktischen, leichten Beutel verpackt, können die Wundversorgungsprodukte überall hin mitgenommen werden.

Diese Gebrauchsanweisung bietet Ihnen eine kurze Beschreibung jedes Produktes und Empfehlungen für den Gebrauch.

Warnung:

Suchen Sie einen Arzt oder anderes qualifiziertes Fachpersonal auf, falls Sie Zweifel bezüglich der korrekten Behandlung einer Wunde oder Verletzung haben sollten. Nur für den Einmalgebrauch!

Inhalt des Sets:

- 4 Nexcare™ Comfort Strips (25 mm x 72 mm)
- 5 Nexcare™ Active Strips (19 mm x 72 mm)
- 2 Nexcare™ Aqua 360° Maxi (60 mm x 89 mm)
- 2 Nexcare™ Active 360° Maxi (50 mm x 101 mm)
- 1 Beutel Steri-Strip™ (6 x 6 mm x 38 mm)
- 1 Beutel Steri-Strip™ (3 x 6 mm x 75 mm)
- 4 Wundreinigungstücher
- 1 Paar Handschuhe

Nexcare™ Comfort Strips

4 Strips, 25 mm x 72 mm

Comfort Strips bestehen aus einer einzigartigen samtweichen und elastischen Mikrofaser, die der Haut das Atmen ermöglicht. Der hypoallergene Klebstoff sorgt für sichere Haftung. Das Pflaster ist jedoch leicht und rückstandslos wieder zu entfernen.

Gebrauchshinweise:

Säubern Sie die Wunde sorgfältig. Bringen Sie Comfort Strips ohne Zug auf die Wunde auf.

Nexcare™ Active Strips

5 Strips, 19 mm x 72 mm

Active Strips haben eine einzigartige, dicke schaumstoffartige Polsterung. Sie haften auch auf feuchter oder verschwitzter Haut, verkleben nicht mit der Wunde, und lassen sich dennoch leicht und rückstandslos entfernen.

Gebrauchshinweise:

Säubern Sie die Wunde sorgfältig. Bringen Sie Active Strips ohne Zug auf die Wunde auf.

Nexcare™ Aqua 360° Maxi

2 Strips, 60 mm x 89 mm

Größere Wundabdeckungen für Knie und Ellbogen. Aqua Strips schützen die Wunde wirksam gegen Wasser, Schmutz und Bakterien und bleiben auch beim Sport, unter der Dusche oder sogar beim Schwimmen haften. Sie bestehen aus einem hypoallergenen, hauchdünnen und atmungsaktiven Schutzfilm und einer Wundauflage. Schützt Schnittwunden, Kratzer und kleine Verletzungen.

⚠ Die Einzelverpackung der Pflaster enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

Gebrauchshinweise:

1. Säubern Sie die Wunde sorgfältig.
2. Entfernen Sie eine Seite des Trägerpapiers.
3. Entfernen Sie das Pflaster von der zweiten Seite des Trägerpapiers und kleben Sie das Pflaster auf die saubere und trockene Haut. Drücken Sie die Pflastereränder fest und falten Sie an.
4. Entfernen Sie nun den Papierrahmen mit Hilfe der runden Lasche. Drücken Sie gegebenenfalls die Pflastereränder nochmals an.
5. Zur Entfernung des Wundpflasters lösen Sie das Pflaster an einer Ecke und ziehen es dann parallel zur Haut ab.

Nexcare™ Active 360° Maxi

2 Strips, 50 mm x 101 mm

Active Strips haben eine einzigartige, dicke schaumstoffartige Polsterung. Sie haften auch auf feuchter oder verschwitzter Haut, verkleben nicht mit der Wunde, und lassen sich dennoch leicht und rückstandslos entfernen. Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde. Kleberand rund um die Wundauflage schützt die Wunde nach aussen.

Gebrauchshinweise:

Säubern Sie die Wunde sorgfältig. Bringen Sie Active Strips ohne Zug auf die Wunde auf.

3M™ Steri-Strip™ Wundverschlussstreifen

1 Strip, 6 mm x 38 mm ; 1 Strip, 6 mm x 75 mm

Gebrauchshinweise:

Säubern und trocknen Sie die Haut in einem Bereich von mindestens fünf Zentimeter um die Wunde. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Karte mit den Strips. Karte entlang der perforierten Linie falten und den oberen Teil abreißen. Führen Sie die beiden Wundränder exakt zusammen. Bringen Sie am Mittelpunkt der Wunde (im rechten Winkel zum Wundverlauf) die eine Hälfte des ersten Strips unter sorgfältigem Druck auf den einen Wundrand auf. Dann bringen Sie die andere Hälfte des Strips, ohne den Klebstoff zu berühren, ebenfalls unter sorgfältigem Druck - aber ohne Zug - auf den anderen Wundrand an. Applizieren Sie anschließend die übrigen Strips in einem Abstand von etwa 3mm zueinander, um eine optimale Heilung und zugleich den Sekretabfluss zu ermöglichen. Decken Sie, wenn nötig, die verschlossene Wunde mit einem Wundpflaster, z.B. Nexcare Aqua Maxi Strips, ab.

Wundreinigungstücher

4 Wundreinigungstücher

Zur Reinigung von kleineren Wunden.

Produziert von:

AKLA AB
Box 534, 182 15 Danderyd, Schweden

Handschuhe

1 Paar Latexhandschuhe

⚠ Das Produkt enthält Naturkautschuk, der allergische Reaktionen verursachen kann.

Produziert von:
TG Medical Sdn
Sdn. Bhd. 41050 Klang, Selangor D.E. Malaisie